

Kliinisen patologian yksikkö 141420

30.1.2023

NÄYTE PARAFIINIBLOKIKSI **Ts-Paraf, 57018**

- Tiedustelut:** Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, näytteiden vastaanotto puh. 044-7113482
- Yhteyshenkilöt:** Sairaalasolubiologit Sanna Suikkanen (puh. 044-7176088, sanna.suikkanen@pshyvinvointialue.fi) ja Satu Remes (puh. 044-7113477, satu.remes@pshyvinvointialue.fi), patologian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Kirsi Hämäläinen (puh.044-7113475, kirsi.m.hamalainen@pshyvinvointialue.fi), ja klinikakaylilääkäri Vesa Kärjä (puh. 044-7113471, vesa.karja@pshyvinvointialue.fi).
- Indikaatio:** Formaliinifiksoidun kudospateriaalin prosessointi parafiiniblokkiin.
- Lähete:** Kudos- ja solunäytteen lähete.
Lähteessä ilmoitetaan selvästi mitä näytteelle halutaan tehtävän.
- Näyteastia:** Formaliinia sisältävä tiiviskantinen näyteastia (Tarra: Kudosnäyte, 10% formaliiini). Formaliinin tilavuuden on oltava kymmenkertainen näytepalaan verrattuna. Näyteastioita voi noutaa patologian laboratorion näytteiden vastaanotosta.
- Näyte:** Kudosnäyte patologiselta muutosalueelta.
- Näytteen säilytys ja kuljetus:** Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan patologian laboratorion näytteiden vastaanottoon huoneenlämpötilassa.
- Menetelmä:** Näyte kudos prosessoidaan, jonka jälkeen näyte valetaan parafiiniin ja siitä valmistuu parafiiniblokki.
- Virhelähteet:** Riittämätön fiksaatio.
- Tekotiheys:** ma-pe
- Tulos valmiina:** 7 arkipäivän kuluessa näytteen saapumisesta (80%).
- Laatija, pvä:** Kirsi Hämäläinen, Sanna Suikkanen, Satu Remes, 30.1.2023
- Hyväksyjä, pvä:** Vesa Kärjä, 31.1.2023