

IMMUNOHISTOKEMIAALLINEN VÄRJÄYS, EI LAUSUNTOA Ts-IHvärj, 57017

Tiedustelut: Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, näytteiden vastaanotto puh. 044-7113482 ja immunohistokemian laboratorio puh. 044-7113971

Yhteyshenkilöt: Patologian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Kirsi Hämäläinen (puh.044-7113475, kirsi.m.hamalainen@kuh.fi) ja klinikkaylilääkäri Vesa Kärjä (puh. 044-7113471, vesa.karja@kuh.fi). Sairaalasolubiologit Sanna Suikkainen (puh. 044-7176088, sanna.suikkanen@kuh.fi) ja Satu Remes (puh. 044-7113477, satu.remes@kuh.fi).

Indikaatio: KYS:n ulkopuolelta tuleva näyte, jolle tehdään värjäyksiä ilman patologin lausuntoa.

Lähet: Kudos- ja solunäytteen lähete.
Lähetteessä ilmoitetaan selvästi mitä värjäyksiä näytteelle halutaan värjättävän ja minne värjätty lasi lähetetään.

Näyte: Formaliinifikoitu ja parafiiniin valettu kudos- tai solunäyte. Valmiiksi leikattuja laseja 3 µm leikepaksuudella, varauksellisille objektilaseille, kaksi per värjäys, tai parafiiniblokki.

Näytteen säilytys ja kuljetus: Säilytetään ja toimitetaan patologian laboratorion näytteiden vastaanottoon huoneenlämpötilassa. Lähetysosoite:

Kuopion yliopistollinen sairaala
Kliininen patologian yksikkö C4500
Rak. 1B, 3. krs
PL100, 70029 KYS

Menetelmä: Immunohistokemiaallinen värjäys. Menetelmä on akkreditoitu (FINAS, SFS-EN ISO 15189:2013). Osa menetelmän värjäyksistä voidaan tehdä alihankintalaboratoriossa.

Tekotiheys: ma-pe

Laatija, pvä: Kirsi Hämäläinen, Satu Remes, 15.9.2020

Hyväksyjä, pvä: Vesa Kärjä, 18.9.2020

Päivitetty, pvä: Vesa Kärjä, Satu Remes, 25.7.2022

Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta:
www.finas.fi - Akkreditoituidut toimijat - T343.